



Synonymer

Pyruvat (blod)

Pyruvat; stc²⁺:

IFCC_IUPAC_KODE

NPU09228

Prøvemateriale

Se prøvetagning.

Stabilitet: Køl: 7

Prøvetagning

Prøven tages på hvilende patient uden brug af "muskelpumpe" og med kortest mulig venestase.

Veneblod tages i glas indeholdende lithuim-heparin og glasset vendes forsigtig. 2,0 mL fuldblod afpipetteres straks efter prøvetagning til specialrør (mærket: Acide perchlorique 1N) indeholdende 2,0 mL 1 mol/L perchlorsyre. Indholdet blandes omhyggeligt. Der centrifugeres 10 min. ved 1800-2000 x g, hvorefter supernatanten afpipetteres til et plastrør. Gummiprop må ikke anvendes som lukning. Prøven fryses.

Ved prøver fra små børn kan der nøjes med 0,5 mL supernatant. Før blodet overføres til specialrøret tilpasses mængden af perchlorsyre så forholdet blod-perchlorsyre stadig er 1+1.

Forsendelse

Specielt glas. Sendes på frost.

Referenceinterval

34 - 80 µmol/L

Kommentarer

Svartid: 7 dage

Opdateret

21/01/19

KONTAKT OS

Informationen du
behøver for at

[kontakte os](#)

Country Websites

[Unilabs Aeskulab](#)[Unilabs Denmark](#)[Unilabs Finland](#)[Unilabs France](#)[Unilabs Middle East](#)[Unilabs Netherlands](#)[Unilabs Norway](#)[Unilabs Peru](#)[Unilabs Portugal](#)[Unilabs Slovakia](#)[Unilabs Spain](#)[Unilabs Sweden](#)[Unilabs Switzerland - French](#)[Unilabs Switzerland - German](#)[Unilabs Switzerland - Italian](#)[Unilabs United Kingdom](#)[Unilabs Yorkbio](#)

Bliv en del af Unilabs

[Bliv en del af Unilabs](#)[At arbejde hos Unilabs](#)[Vores Kultur](#)